


## Советы по уходу за детской кожей во время терапии с применением окклюдеров

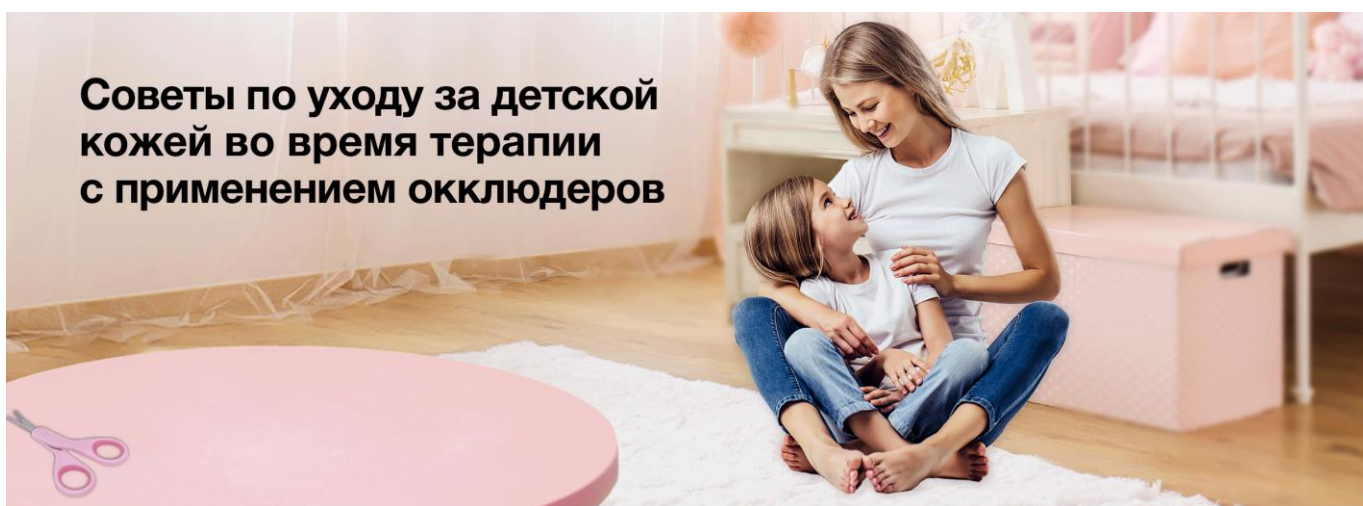

### Общие советы

- Перед началом терапии с применением окклюдеров необходима консультация специалиста.
- Желательно процедуру наклеивания окклюдера проводить в комфортном помещении и спокойной обстановке, предварительно объяснив малышу ваши действия, тем самым успокоив его.
- Мы рекомендуем наклеивать окклюдер на сухую чистую кожу. Для подготовки кожи промойте область вокруг глаза теплой водой и аккуратно промокните сухим чистым полотенцем. Дайте оставшейся влаге испариться в течение 1-2 минут.
- Попросите малыша закрыть оба глаза и сидеть спокойно, расслабив мышцы лица. Перед наклеиванием удалите бумажную защитную подкладку с окклюдера. Не растягивайте пластырь и не оттягивайте кожу на лице. Для более длительного ношения рекомендуем усилить фиксацию приглаживающими движениями по периметру окклюдера.
- Удаление окклюдера. Сохранить целостность кожи поможет правильная методика удаления окклюдера. При снятии окклюдера аккуратно зацепите его край у внутреннего угла глаза и плавным медленным движением параллельно поверхности кожи удалите окклюдер, «заворачивая» его в сторону внешнего угла глаза. Важно! Не тяните окклюдер резко вверх – такое движение провоцирует возможные повреждения кожи и вызывает дискомфорт у малыша.
- Будьте здоровы!

### Рекомендации при длительной терапии с применением окклюдеров



При многократном наклеивании и удалении любых клеящихся медицинских изделий (пластырь, окклюдер, повязка) поверхностный слой кожи может травмироваться и не всегда успевает восстанавливаться, что может проявляться в виде раздражения и покраснения на коже вокруг глаз.

При длительном ношении окклюдеров особенно чувствительную детскую кожу можно дополнительно защитить. Для этого мы рекомендуем использовать нераздражающую защитную пленку 3M™ Cavilon в форме выпуска: аппликатор 1 мл. 3M™ Cavilon в форме выпуска: аппликатор, 1 мл – это стерильная жидкость, которая при нанесении на кожу образует тончайший полимерный слой (пленку). Пленка обеспечит дополнительную защиту кожи вашего малыша от контакта с адгезивами (клеем) окклюдера и поможет

снизить риск возникновения раздражения.

Способ применения:

- Наносите 3M™ Cavilon в форме выпуска: аппликатор, 1 мл в один тонкий слой исключительно на область контакта кожи с клеевой частью окклюдера.
- Попросите малыша держать глаз закрытым - категорически запрещается попадание средства в глаза! При попадании на слизистую оболочку глаза немедленно промойте прохладной водой!
- Перед наклеиванием окклюдера дайте средству высохнуть на коже в течение 90 секунд.
- 3M™ Cavilon в форме выпуска аппликатор, 1 мл является индивидуально упакованным, стерильным, одноразовым.