

Инструкция по применению

Наклейки прозрачные пленочные для закрытия ран и фиксации катетеров: Tegaderm+Pad

Описание: Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров Tegaderm+Pad с впитывающей прокладкой представляет собой повязку, обладающую барьерными свойствами для воды, бактерий и вирусов*. Изделие состоит из непрелипающей впитывающей прокладки, расположенной на тонкопленочной основе (большого размера) с нанесенным гипоаллергенным безлатексным адгезивом.

*Тестирование *in vitro* свидетельствует о том, что наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров обеспечивает защиту от проникновения вирусов диаметром 27 нм или выше при условии, если наклейка не повреждена и непроницаема.

Область применения

Для закрытия чистых послеоперационных и травматических ран, профилактики и лечения поверхностных пролежней.

При использовании изделия необходимо соблюдать процедуру перевязки ран. Данное изделие не разрабатывается, реализуется или предназначается для применения в каких-либо целях, помимо указанных. Может поставляться в следующих размерах: 5см x 7см, 6см x 10см, 9см x 10см, 9см x 10,5см, 9см x 15см, 9см x 20см, 9см x 25см, 9см x 35см, 15см x 15см.

Противопоказания

Каких-либо противопоказаний к применению данных изделий выявлено не было.

Предупреждения:

Не использовать наклейку в качестве замены шовного материала и других первичных средств ушивания раны.

Меры предосторожности:

1. Перед наложением необходимо остановить кровотечение на поврежденном участке кожи.
2. Не растягивайте наклейку во время наложения на рану, поскольку натяжение может травмировать кожу.
3. Во избежание раздражения кожи и для обеспечения плотного прилегания к коже перед наложением наклейки необходимо убедиться, что на коже нет следов мыла или лосьона и что кожа чистая и сухая.
4. Наклейка может накладываться на инфицированные участки кожных покровов, но только под наблюдением медицинского работника.

Инструкции по применению:

Выбор наклейки:

Выберете подходящий размер наклейки прозрачной пленочной для закрытия раны или фиксации катетера так, чтобы края наклейки соприкасались шириной минимум 2.5 см с сухой здоровой кожей вокруг места крепления

Подготовка места наложения:

1. Подготовьте рану или место установки катетера в соответствии со стандартными правилами вашего лечебного учреждения.
2. Для обеспечения наилучшей адгезии, удалите волосы с помощью стригущей машинки (клиппера). Бритьё станком не рекомендуется.
3. Перед нанесением наклейки на поверхность необходимо убедиться, что антисептик из защитные средства для кожи полностью высохли.

Наложение:

1. Вскройте упаковку и аккуратно извлеките стерильную наклейку.
2. Снимите бумажную подложку, обнажив клеевую поверхность.
3. Расположите окантовку наклейки над раной или над портом катетера, не растягивайте наклейку.
4. Зафиксируйте наклейку на месте.

5. Аккуратно снимите бумажную рамку с поверхности наклейки, одновременно плотно прижимая края наклейки к коже. Разгладьте наклейку по всей поверхности, обеспечивая надежное приклепление.

Уход за местом наложения:

1. Необходимо проверять место наложения на признаки возникновения инфекции или иных осложнений. При возможном наличии инфекции снимите наклейку, проинспектируйте непосредственно место наложения и определите необходимость в медицинском вмешательстве. Признаками инфекции могут являться жар, боль, покраснение, отек, необычный запах или выделения.
2. Меняйте наклейку в соответствии со стандартными правилами вашего лечебного учреждения или при ухудшении барьерных характеристик.

Снятие:

Аккуратно возьмитесь за край и медленно снимайте наклейку с кожи в направлении роста волос. Не допускайте повреждения кожи, оттягивая наклейку назад, а не вверх по отношению к коже.

Условия хранения/Срок годности

Срок годности 3 года. Годен до: см.на упаковке. Хранить при комнатной температуре. Данное медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Утилизация

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными/региональными/национальными/международными требованиями законодательства. Медицинские изделия должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» класс отходов Б).

Транспортные условия

Гарантированный срок службы изделий соответствует указанному на этикетке при хранении согласно рекомендованным условиям хранения. Во время транспортировки изделия могут подвергаться кратковременным колебаниям температур, это не влияет на их безопасность и эффективность.

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта.

Гарантийные обязательства производителя

Компания 3М гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом.

Объяснение символов:

 Не применять при поврежденной или вскрытой упаковке

 Данный продукт и упаковка не содержат натурального каучукового латекса


 Стерилизуется радиацией

 Не использовать повторно

 Номер партии

 Дата истечения срока годности

 Предупреждение, см. инструкцию по применению

 Производитель

RUS: Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ЗАО «3М Россия», 121614, Москва, ул. Крылатская д. 17 стр. 3
тел.: +74957847474

